



Encuentre la cura para su problema de ED

Póngale punto final a su frustración. Recupere la confianza. Siéntase completo.

Disfunción eréctil

Encuentre la cura adecuada para usted


¿Qué es la disfunción eréctil (ED)?

La disfunción eréctil se define como la incapacidad persistente de lograr o mantener una erección suficientemente firme para el coito.¹


¿Cuán común es la disfunción eréctil?

La disfunción eréctil es un problema común y es importante que usted sepa que no está solo:

Desglose por edad de los hombres con disfunción eréctil¹

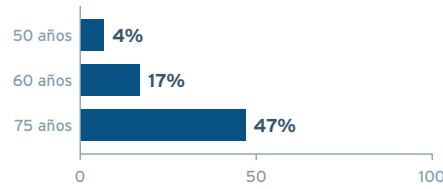

Aproximadamente **1 de cada 5** hombres estadounidenses de 20 años de edad o mayores sufre algún grado de disfunción eréctil.²

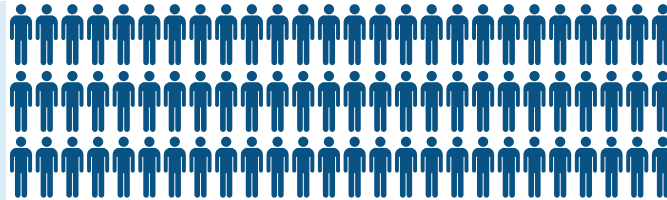


Más de la mitad de los hombres mayores de 40 años tienen algún grado de disfunción eréctil.⁴

En los Estados Unidos, esto equivale a cerca de **39 millones de hombres.**³

¿Cuál es la causa de la disfunción eréctil?^{1,5,6}

Hay varias causas para la disfunción eréctil.

Hay verdaderos motivos físicos y psicológicos detrás de la disfunción eréctil.

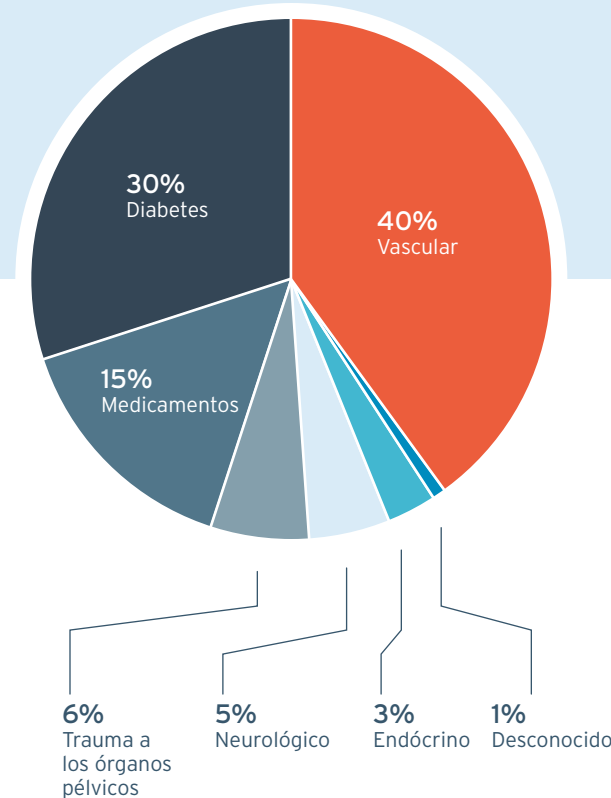

Las siguientes son algunas causas comunes:

- Diabetes
- Enfermedad cardiovascular (hipertensión, enfermedad cardíaca)
- Tratamiento de cáncer de próstata
- Cirugía (de próstata, vejiga, colon, recto)
- Medicamentos (antihipertensión, antidepresivos)
- Opciones de estilo de vida (fumar, consumo excesivo de alcohol, obesidad, falta de ejercicio)
- Lesiones de la médula espinal
- Problemas hormonales

La disfunción eréctil no es solo un problema médico, sino que también puede afectar profundamente las relaciones.⁷

"La intimidad que solíamos tener desapareció. De pronto, sentí que estábamos completamente separados. No había conexión".


– Tom

Visite EDCure.org/es para obtener recursos útiles




Las erecciones y cómo funcionan^{1,5}

Para saber más acerca de la disfunción eréctil, es importante comprender cómo funciona normalmente el pene. El proceso de erección incluye las siguientes 5 etapas:

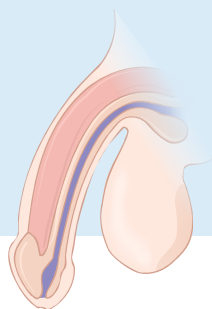


1. Llenado inicial

Cuando está excitado sexualmente, los nervios envían una señal al músculo liso peniano para que se relaje. Esta relajación permite un aumento del flujo sanguíneo en las dos cámaras, los cuerpos cavernosos, que se encuentran dentro del tronco del pene.

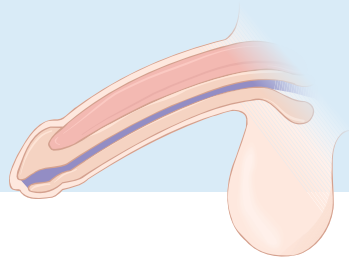


2. Erección parcial

Las arterias dentro del pene se expanden para permitir el ingreso del mayor flujo sanguíneo. El pene comienza a llenarse con sangre, a expandirse y a elongarse.

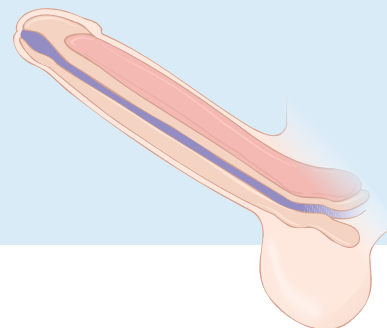


3. Erección completa

A medida que la cantidad de sangre sigue aumentando dentro del pene, el pene comienza a endurecerse y a ponerse rígido y erecto.

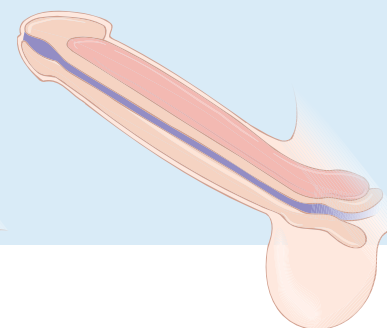

4. Erección rígida

Se alcanza la máxima rigidez. El glande, o punta del pene, y el tronco del pene se agrandan o se hinchan con sangre hasta que las venas del pene se comprimen enérgicamente. Esto atrapa la sangre dentro del pene para mantener una rigidez máxima del pene.

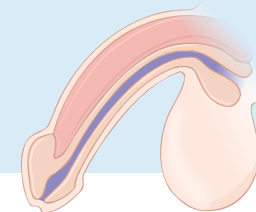

5. Retorno al estado flácido

Una vez que el hombre eyacula o tiene un orgasmo, los nervios envían una señal para que la sangre se retire del pene erecto. A esto se lo denomina detumescencia. El pene regresa a un estado flácido sin erección.⁸

Opciones de tratamiento de la disfunción eréctil⁵

Sea lo que sea que cause su disfunción eréctil, existe una opción de tratamiento que puede proporcionar una solución satisfactoria.

Si prueba una de las opciones de tratamiento que le presentamos y esta no le funciona o usted no se siente completamente satisfecho, no se desanime ni pierda las esperanzas.

Estas opciones de tratamiento tienen diversos grados de efectividad para cada hombre según la causa de su disfunción eréctil. El daño irreversible a los vasos sanguíneos o a los nervios podría afectar el éxito de algunos de estos tratamientos. Por ejemplo, los medicamentos orales no funcionan bien para algunos hombres.⁹ De hecho, la mitad de los hombres que prueban medicamentos orales renuncian a las pastillas o aseguran que han dejado de funcionar.¹⁰

Es importante conocer todas las opciones disponibles y discutir las con su médico para determinar cuál será la más adecuada para usted y su estilo de vida. Un especialista en disfunción eréctil le ayudará a encontrar un tratamiento permanente para su disfunción eréctil.




Medicamentos por vía oral

Hay varios medicamentos con receta disponibles que pueden mejorar el flujo de sangre al pene. Al combinarlos con la estimulación sexual, pueden producir una erección.


Dispositivos de vacío para erecciones

Se coloca un tubo plástico hueco sobre el pene y se utiliza una bomba (manual o de pilas) para crear un vacío que irrigue sangre al pene. Una vez que se logra una erección, se coloca un anillo elástico de tensión en la base del pene para ayudar a mantener la erección.

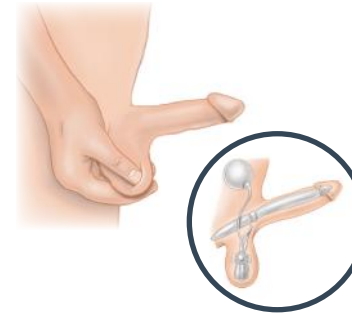

Implantes penianos

Se implanta un dispositivo en el pene que está diseñado para permitirle al hombre con disfunción eréctil tener una erección. El dispositivo está completamente inserto en el cuerpo, por lo que nadie puede verlo, y el usuario lo controla para lograr una erección. Este tratamiento está diseñado para permitir una mayor espontaneidad, y la erección se puede mantener todo el tiempo que se desee.

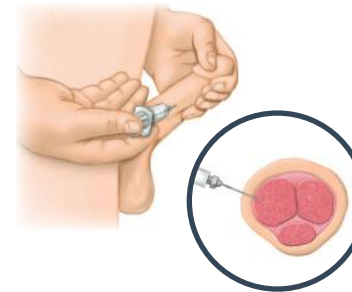

Inyecciones

Con la terapia de inyecciones, se utiliza una aguja para inyectar el medicamento directamente en el pene. El medicamento permite el flujo de sangre en el pene, lo que crea una erección.



Supositorios intrauretrales


Se inserta un aplicador que contiene un gránulo pequeño en la uretra y se libera el gránulo. El gránulo se disuelve y aumenta el flujo de sangre al pene, lo cual crea una erección.

Visite EDCure.org/es para obtener más información acerca de las opciones de tratamiento

¿Qué es un implante peniano?

Los implantes penianos están diseñados como solución permanente para los hombres que padecen disfunción eréctil y como un apoyo oculto para una erección en el lugar y en el momento que se desee.

Los implantes penianos se han usado clínicamente por más de **40 años**¹¹ y casi **500 000 hombres** han recibido un implante peniano de AMS Men's Health.³

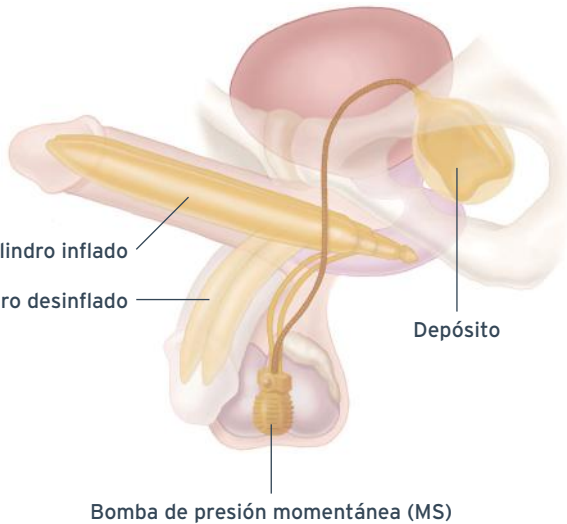

Entre los implantes de AMS Men's Health disponibles, el implante peniano AMS 700™ es la prótesis inflable más popular porque es la que mejor imita las erecciones naturales, ya que proporciona rigidez al inflarla y vuelve a tener un aspecto flácido al desinflarla.



El procedimiento de implante generalmente es un procedimiento ambulatorio. Se realiza una pequeña incisión en el escroto o arriba del hueso púbico y un urólogo inserta todos los componentes por este pequeño orificio. La operación se realiza con anestesia. Generalmente los pacientes tardan unos días en volver a su rutina habitual de actividad ligera. Los urólogos suelen recomendar que los pacientes esperen entre 4 y 6 semanas antes de usar el implante para tener relaciones sexuales.¹²

Un implante peniano puede ofrecer una solución permanente para los hombres que han tratado otros tratamientos sin éxito o que no han quedado satisfechos con estos. En comparación con las otras opciones de tratamiento, el implante ofrece espontaneidad: le permite tener sexo cuando lo desea y la erección puede durar tanto como usted desee. El implante es discreto y está completamente inserto en el cuerpo. No hay componentes visibles, por lo que sería difícil que alguien notara que tiene este dispositivo.

“Podría entrar a un vestuario y nadie lo notaría. Me veo igual que cualquier otro hombre. La totalidad del implante está dentro de mi cuerpo”.

– Tom


Visite EDCure.org/es para obtener recursos útiles

Características del implante peniano:

- Diseñado como solución permanente para la disfunción eréctil.
- Espontaneidad; puede tener relaciones sexuales cuando quiera.
- Una vez que se activa, la erección dura tanto tiempo como usted desee.
- Contenido completamente dentro del cuerpo; nadie sabrá que lo tiene, a menos que usted se lo diga.
- Diseñado para lograr una sensación natural durante el coito.
- Alto grado de satisfacción de los pacientes y de sus parejas¹³⁻¹⁵.
- Normalmente no interfiere con la eyaculación ni con el orgasmo^{14,16}.

Riesgos de los implantes penianos:^{11,17}

- Imposibilita tener erecciones espontáneas o naturales y otras opciones de tratamiento quirúrgico.
- Pueden surgir desperfectos mecánicos en el implante, lo que podría requerir una cirugía de revisión.
- En caso de que fuera necesario quitar el implante y reemplazarlo, es posible que el pene se acorte, quede curvado o desarrolle una cicatriz.
- Dolor (normalmente relacionado con el proceso de cicatrización).
- Los pacientes que padecen diabetes, lesiones en la médula espinal o llagas corren mayor riesgo de contraer una infección.
- El riesgo de infección en el implante es de 1% a 2,5%¹⁸.

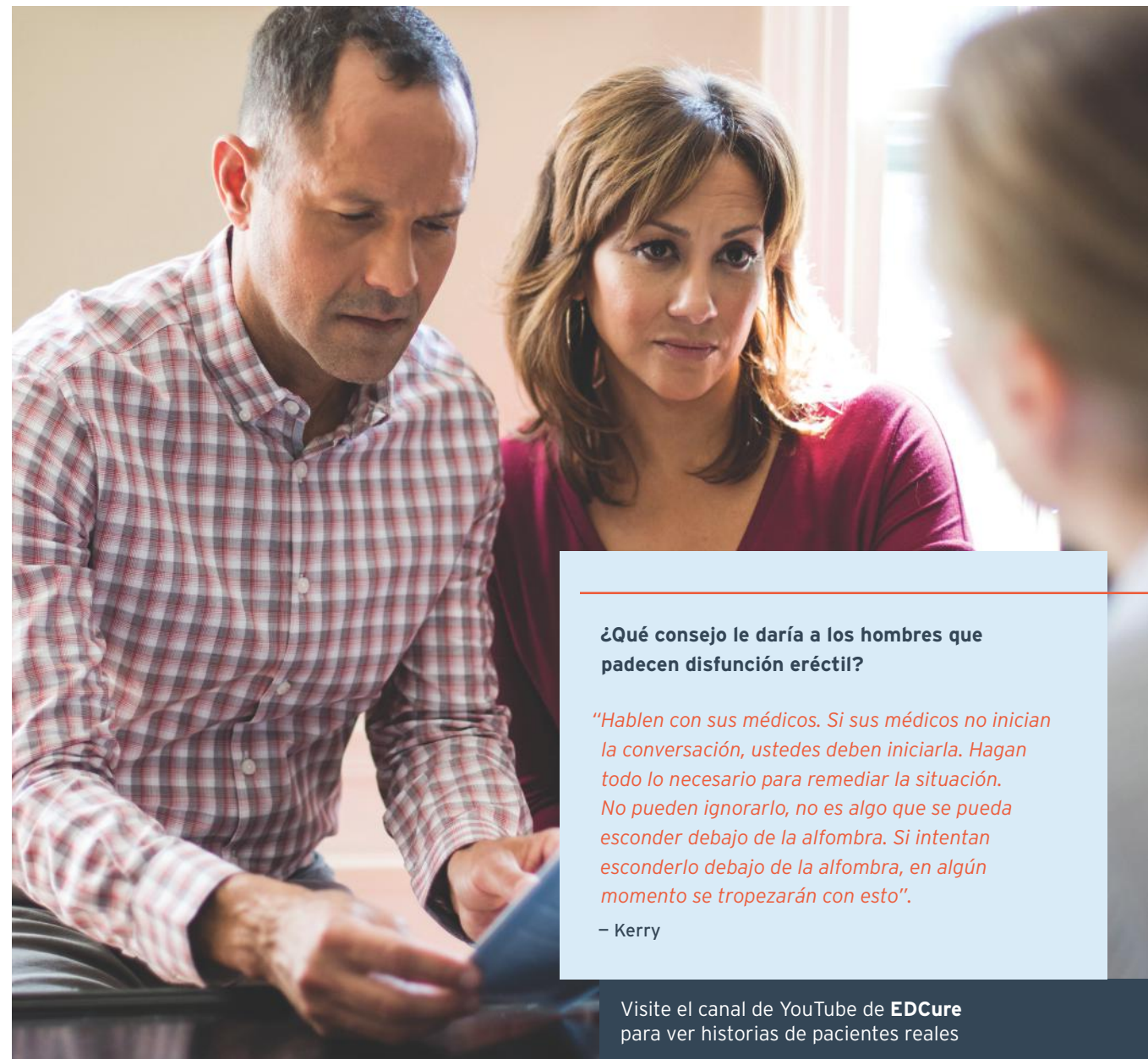

¿Qué consejo le daría a los hombres que padecen disfunción eréctil?


“Hablen con sus médicos. Si sus médicos no inician la conversación, ustedes deben iniciarla. Hagan todo lo necesario para remediar la situación. No pueden ignorarlo, no es algo que se pueda esconder debajo de la alfombra. Si intentan esconderlo debajo de la alfombra, en algún momento se tropezarán con esto”.

– Kerry

Visite el canal de YouTube de **EDCure** para ver historias de pacientes reales

AMS 700™ Implante peniano inflable de tres componentes

El implante AMS 700 incluye un par de cilindros que se implantan en el pene, una bomba que se coloca dentro del escroto y un depósito de solución salina que se coloca en el bajo vientre. Al apretar y soltar la bomba se envía el fluido a los cilindros y esto crea una erección. Los cilindros se desinflan presionando un botón en la bomba. El pene luego regresa a un estado blando, flácido y de aspecto natural.

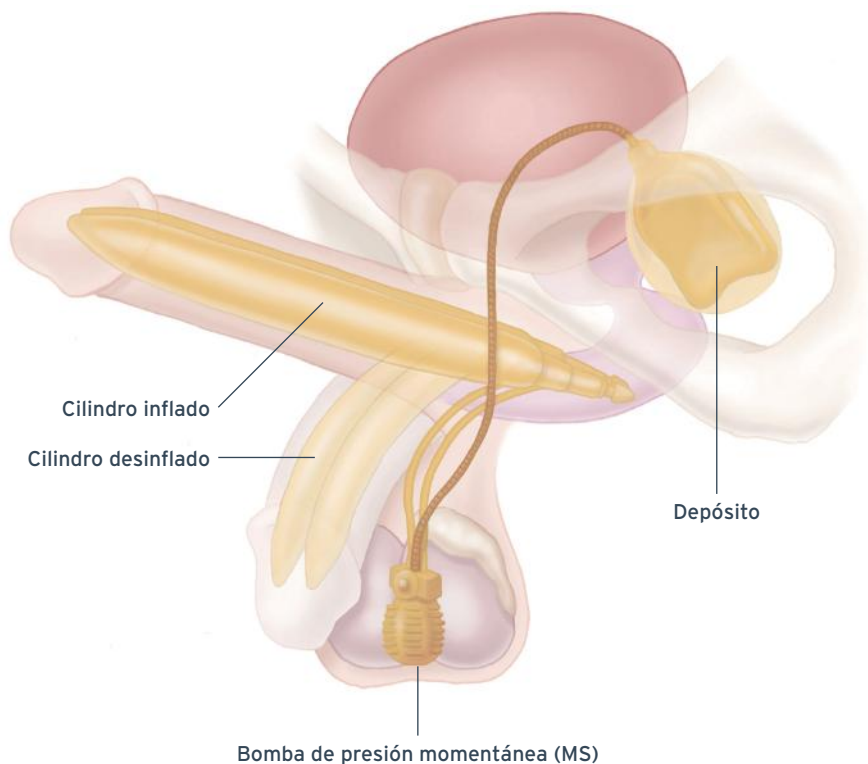

Características exclusivas de un implante AMS 700™

Reducción de la infección

- El único implante en el mercado impregnado con antibióticos para reducir el riesgo de infección¹⁸.

Bomba de presión momentánea (MS)™

- Botón de un solo toque para el desinflado diseñado para mayor facilidad de uso.
- Válvula de cierre diseñada para reducir el inflado automático.

Confiabilidad y durabilidad

- El implante está cubierto con parileno para mejorar la durabilidad a largo plazo del dispositivo¹⁹.
- Diseñado como solución permanente para la disfunción eréctil.
- Disponible sin antibióticos para personas alérgicas a la tetraciclina.

“Solo hay que bombearla para conseguir la erección deseada y, al terminar, se desinfla. Cuando se desinfla, vuelve a bajar y todas las sensaciones son naturales. Yo sigo sintiendo cuando tengo una erección; se siente como si no hubiera ocurrido nada. Los sentimientos siguen allí. Las sensaciones siguen allí. Así que todo sigue siendo igual que antes”.

– Fabio

“Investigué varios dispositivos y finalmente me decidí por AMS... Era el único dispositivo [AMS 700 LGX] en el mercado que permitía una expansión de circunferencia y longitud, lo cual era importante para mí”.

– David

AMS Men's Health ofrece tres tipos de implantes de tres piezas

Implante peniano AMS 700™ LGX

- El único implante peniano con cilindros en el mercado, diseñado para expandirse en longitud entre un 10% y un 25%, según la anatomía del paciente³.
- Cilindros diseñados para solucionar el problema n.º 1 de los hombres que sufren de disfunción eréctil: la pérdida de longitud del pene²⁰.
- Expansión controlada diseñada para proporcionar una máxima rigidez y una expansión óptima de la circunferencia.
- Erección firme y rígida que puede durar tanto tiempo como se desee.
- Aspecto flácido y natural cuando está desinflado.

Implante peniano AMS 700™ CX


- Expansión controlada diseñada para proporcionar una máxima rigidez y una expansión óptima de la circunferencia.
- Erección firme y rígida que puede durar tanto tiempo como se desee.
- Aspecto flácido y natural cuando está desinflado.

Implante peniano AMS 700™ CXR

- Todos los beneficios de la serie de implantes AMS 700, incluida la expansión de circunferencia para pacientes que quizás requieran cilindros más angostos.
- Expansión controlada diseñada para proporcionar una máxima rigidez y una expansión óptima de la circunferencia.
- Erección firme y rígida que puede durar tanto tiempo como se desee.
- Aspecto flácido y natural cuando está desinflado.


Selecciones adicionales de implantes de AMS Men's Health

Hable con su médico para determinar cuál es el implante adecuado para usted.

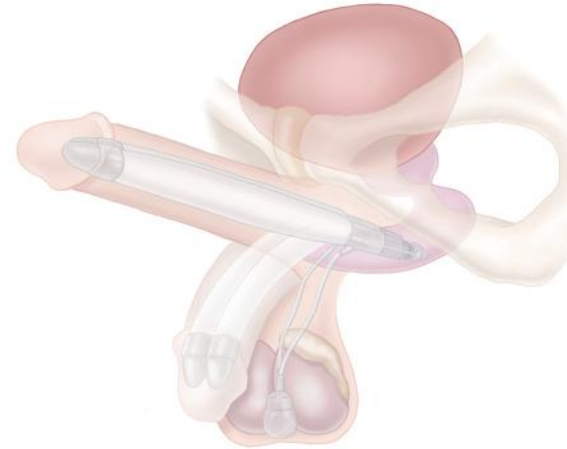

Implante peniano AMS Ambicor™

- Compuesto por 2 cilindros y una bomba.
- Proporciona una erección firme y rígida sin un depósito separado.

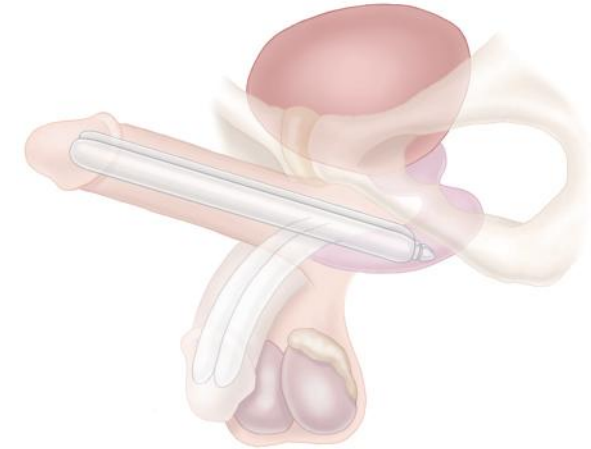

Implante peniano ocultable Spectra™

- Implante maleable (se puede doblar).
- No requiere líquido.
- No requiere bomba ni depósito.

Satisfacción del paciente

La disfunción eréctil puede limitar su intimidad, afectar su autoestima y perjudicar sus relaciones más importantes.⁷

Muchos estudios demuestran que los implantes penianos pueden ofrecer los resultados satisfactorios que tantas parejas buscan. Consulte a su médico para determinar qué tipo de implante es más adecuado para su afección y su estilo de vida.

En un estudio de 200 pacientes y 120 parejas, tanto los hombres como sus parejas declararon que el implante peniano AMS 700™ era satisfactorio:¹⁴

98%

de los pacientes informaron que sus erecciones fueron excelentes o satisfactorias después de la cirugía.

92%

de los pacientes informaron que la actividad sexual con el implante era excelente o satisfactoria.

En una entrevista a 253 pacientes que recibieron un implante peniano AMS 700™, se informó que hubo:²¹


97%

de satisfacción general con el implante AMS 700; ningún paciente informó sentirse insatisfecho.

Satisfacción de la pareja


Con frecuencia, los pacientes se preguntan si su actividad sexual será igual y si podrán tener orgasmos y sensaciones.

En un estudio de 200 pacientes y 120 parejas, tanto los hombres como sus parejas declararon que el implante AMS 700™ era satisfactorio:¹⁴

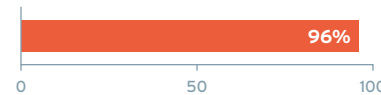


96% de las parejas informaron que la actividad sexual con el implante era excelente o satisfactoria.

En un estudio de 4 años, se les preguntó a más de 248 pacientes y 207 parejas de pacientes que recibieron un implante peniano cuál era su grado general de satisfacción con las relaciones sexuales.¹⁵

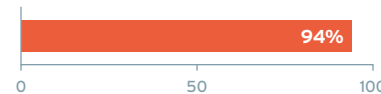

94% de los pacientes declararon estar satisfechos o muy satisfechos con el implante de AMS Men's Health.

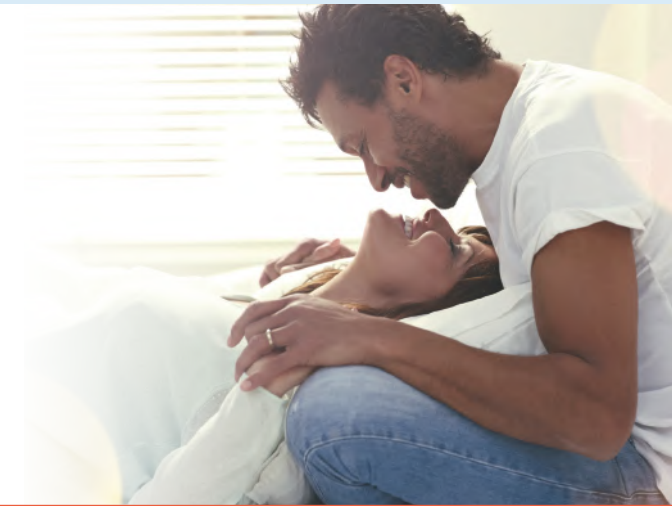

“Para mí es muy emocionante. Una vez que eyacula, la erección sigue allí. Podemos tener intimidad durante todo el tiempo que yo quiera, lo que es muy satisfactorio para mí”.

– Linda

Visite EDCure.org/es para obtener más información acerca de la satisfacción del paciente

¿Qué significa para usted tener un implante peniano?



Recupere la confianza

"Me preocupa satisfacer a mi pareja. Y ahora sé que puedo hacer eso. [En mi experiencia], no hay excusas ni pretextos al respecto. Es algo que definitivamente ocurre. Para mí, es pura dicha. El implante peniano me devolvió la dicha y la confianza, y todo lo que es normal".

—Herschel



Una opción confiable

"Funciona todo el tiempo, cada vez que quiero tener una erección; [para mí] es 100% confiable. No tengo la sensación de que voy a fallar y dura tanto como yo quiero. La frase que uso para describirlo es que la prótesis cambió mi "DE", de disfunción eréctil, por una "EAD", o erección a demanda".

—Marsha y Graham



Sepa que puede llevarlo a cabo

"No solo se trata de poder hacerlo, sino de saber que puedo hacerlo cuando quiera. El lado verdaderamente positivo de tener un implante es que aunque tengas un orgasmo, la erección no se va. Así que es una gran ventaja para tu pareja porque la erección sigue allí".

—Danny



Cercanía y espontaneidad

"Si quiero tener sexo con mi esposa y queremos tener ese tiempo juntos, podemos hacerlo sin necesidad de usar ninguna inyección. No hay que usar un dispositivo de vacío, ni el tubo de vacío con cintas, ni ninguno de esos objetos que solo interfieren con la espontaneidad del momento. Es tan similar a una erección natural que, después de un tiempo, casi te olvidas de que tienes un implante. Se siente tan normal y tan habitual que creo que ha logrado tener un gran impacto".

—Vilma y Kerry



Recupere lo que había perdido

"Creo que olvidas lo que te estás perdiendo. Si dejas de buscarlo, te olvidas y te dices a ti misma "todo está bien"; pero luego te das cuenta y piensas "increíble, esto nos estuvimos perdiendo todo este tiempo". Y eso aumenta la conexión entre los dos".

—Vilma

Lo que vale la pena, vale la espera.

"La única parte difícil es cuando te dicen que durante 6 semanas no puedes "hacer nada". Después de esas 6 semanas... todo lo que puedo decir es que valió la espera."

— Sarah

Visite el canal de YouTube de **EDCure** para ver más historias de pacientes

Preguntas frecuentes sobre implantes penianos:

¿Mi pene se verá diferente o las otras personas podrán notar que tengo un implante peniano?

Una vez que esté en su lugar, el implante será completamente imperceptible. Queda totalmente oculto en el cuerpo. Nadie lo sabrá a menos que usted les cuente, incluso en un vestuario.

¿Cuánto dura el proceso de recuperación después de la cirugía de disfunción eréctil, y cuándo puedo tener relaciones?

La mayoría de los hombres regresa a su hogar un día después de la cirugía, retoma todas sus actividades normales en una semana, y generalmente tiene relaciones sexuales aproximadamente 6 semanas después de la cirugía.¹²

¿Cuánto dura un implante? ¿En algún momento será necesario reemplazarlo?

Es imposible predecir cuánto tiempo funcionará un implante en particular en cada paciente. Al igual que con cualquier otro dispositivo médico, los implantes penianos pueden sufrir desgaste y fallas mecánicas con el tiempo. Un estudio reciente de pacientes que recibieron un implante peniano AMS 700™ demostró que la continuidad mecánica de un implante peniano de AMS Men's Health durante 7 años es superior al 94,5%.²² Para prolongar la vida útil de su implante, siga los consejos de su urólogo.

¿El seguro cubre los implantes penianos?

La mayoría de las compañías de seguros médicos cubre el diagnóstico y el tratamiento médicamente necesarios de la disfunción eréctil. Medicare tiene una política nacional para la disfunción eréctil, que incluye implantes penianos, aunque la cobertura de estos dependerá del lugar en el que usted viva. Consulte con su médico y su proveedor del seguro para comprobar los niveles de cobertura antes de recibir el tratamiento. Hay programas de asistencia financiera disponibles para ayudarlo a cubrir los gastos de bolsillo o para ayudar a cubrir la operación si su seguro privado no los cubre.

Para consultar la lista completa de preguntas frecuentes, visite EDCure.org/es

¿Sabía usted...?

En los EE. UU., más de la mitad de los hombres mayores de 40 años tienen algún grado de disfunción eréctil.⁴

Visite EDCure.org/es para:

- Completar el cuestionario de disfunción eréctil en línea y obtener resultados personalizados de tratamiento
- Encontrar un especialista en disfunción eréctil en su área
- Inscribirse en seminarios educativos gratuitos para aprender más acerca de las opciones de tratamiento
- Escuchar los casos reales de otras personas como usted que han encontrado su cura para la disfunción eréctil
- Recibir respuestas comunes a preguntas comunes acerca de la disfunción eréctil, los implantes penianos y la cobertura del seguro

Conversar con alguien que haya pasado por la misma experiencia:

Escríbanos a MHPatientEducation@bsci.com o llame al **1-844-4ED-CURE** y hable con un paciente que haya encontrado un tratamiento exitoso para su disfunción eréctil.

Atención: Las leyes federales estadounidenses restringen la venta de este dispositivo a médicos, o bajo prescripción de un médico. El médico es su mejor fuente de información acerca de los riesgos y los beneficios de la prótesis peniana inflable AMS 700™ con bomba MS Pump™. Hable con su médico para obtener una lista completa de los riesgos, las advertencias y la información de seguridad importante.

La prótesis peniana inflable AMS 700™ con bomba MS Pump™ está indicada en el tratamiento de la disfunción eréctil masculina (impotencia). Implantar una prótesis peniana dañará o destruirá cualquier capacidad restante de tener una erección natural y también hará que otras opciones de tratamiento ya no sean posibles.

Los pacientes que tienen diabetes, lesiones en la médula espinal o infecciones cutáneas pueden correr mayor riesgo de contraer una infección. El implante puede acortar o curvar el pene, o dejar cicatrices en él. Algunos dispositivos AMS 700 contienen un antibiótico (tratamiento superficial con antibiótico InhibiZone™). El dispositivo puede no ser adecuado para pacientes que sean alérgicos a los antibióticos que contiene el dispositivo (rifampina, minociclina u otras tetraciclinas) o que tengan lupus sistémico.

Los riesgos posibles incluyen: falla/mal funcionamiento del dispositivo que requiera una cirugía adicional, migración del dispositivo que posiblemente cause la exposición a través del tejido, desgaste/pérdida de tejido (erosión del tejido/dispositivo), infección, inflado accidental del dispositivo y dolor/molestia.

Atención: Las leyes federales estadounidenses restringen la venta de este dispositivo a médicos, o bajo prescripción de un médico. El médico es su mejor fuente de información acerca de los riesgos y los beneficios de las prótesis penianas AMS Ambicor™. Hable con su médico para obtener una lista completa de los riesgos, las advertencias y la información de seguridad importante.

La utilización de la prótesis peniana inflable AMS Ambicor™ está indicada en el tratamiento de la disfunción eréctil masculina (impotencia). Implantar una prótesis peniana dañará o destruirá cualquier capacidad restante de tener una erección natural y también hará que otras opciones de tratamiento ya no sean posibles.

Los pacientes que tienen diabetes, lesiones en la médula espinal o infecciones cutáneas pueden correr mayor riesgo de contraer una infección. El implante puede acortar o curvar el pene, o dejar cicatrices en él.

Los riesgos posibles incluyen: falla/mal funcionamiento del dispositivo que requiera una cirugía adicional, migración del dispositivo que posiblemente cause la exposición a través del tejido, desgaste/pérdida de tejido (erosión del tejido/dispositivo), infección, inflado accidental del dispositivo y dolor/molestia.

Atención: Las leyes federales estadounidenses restringen la venta de este dispositivo a médicos, o bajo prescripción de un médico. El médico es su mejor fuente de información acerca de los riesgos y los beneficios de la prótesis peniana ocultable Spectra™. Hable con su médico para obtener una lista completa de los riesgos, las advertencias y la información de seguridad importante.

La prótesis peniana ocultable Spectra™ está indicada en el tratamiento de la disfunción eréctil masculina (impotencia). Implantar una prótesis peniana dañará o destruirá cualquier capacidad restante de tener una erección natural y también hará que otras opciones de tratamiento ya no sean posibles.

Los pacientes que tienen diabetes, lesiones en la médula espinal o infecciones cutáneas pueden correr mayor riesgo de contraer una infección. El implante puede acortar o curvar el pene, o dejar cicatrices en él.

Para más información, consulte los Manuales para el paciente del producto que puede proporcionarle su médico.

Testimonios de pacientes

Las historias que se presentan en este folleto cuentan las experiencias de personas que utilizan terapias de AMS relacionadas con la disfunción eréctil. AMS Men's Health invitó a estas personas a compartir sus historias con sinceridad. A medida que las vea, tenga en cuenta que las experiencias son específicas de estas personas en particular. Como con todos los tratamientos médicos, no todas las respuestas son iguales. Recomendamos que hable con su médico sobre cuál es el tratamiento correcto para usted.



1. Erectile dysfunction. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/erectiledysfunction.html>. Accessed May 2015.
2. Selvin E, Burnett AL, Platz EA. Prevalence and risk factors for erectile dysfunction in the US. *Am J Med*. 2007 Feb;120(2):151-7.
3. Data on file with Boston Scientific and based on market research by Dymedex.
4. Feldman HA, Goldstein I, Hatzichristou DG, et al. Impotence and its medical and psychosocial results of the Massachusetts Male Aging Study. *J Urol*. 1994 Jan;151(1):54-61.
5. Erectile dysfunction (ED). www.auanet.org/content/education-and-meetings/med-stu-curriculum/ed.pdf. American Urological Association Web site. Downloaded January 21, 2013.
6. Shabsigh R, MD, Lue TF, MD. A Clinician's Guide to ED Management. New York: Haymarket Media Inc.; 2006.
7. DiMeo PJ. Psychosocial and relationship issues in men with erectile dysfunction. *Urol Nurs*. 2006 Dec;26(6):442-6.
8. Walter S, Lehu P. What Happens During Sexual Intercourse. <http://www.dummies.com/how-to/content/what-happens-during-intercourse.html>. Accessed June 7, 2016.
9. Walsh TJ, Hotaling JM, Smith A, et al. Men with diabetes may require more aggressive treatment for erectile dysfunction. *Int J Impot Res*. 2014 May-Jun;26(3):112-5.
10. Matthew AG, Goldman A, Trachtenberg J, et al. Sexual dysfunction after radical prostatectomy: prevalence, treatments, restricted use of treatments and distress. *J Urol*. 2005 Dec;174(6):2105-10.
11. Scott FB, Bradley WE, Timm GW. Management of erectile impotence: use of implantable inflatable prosthesis. *Urology*. 1973 Jul;2(1):80-2.
12. AMS 700™ Patient Manual. Information and Instructions for Patients Considering an Inflatable Penile Prosthesis. American Medical Systems. 2012.
13. Rajpurkar A, Dhabuwala CB. Comparison of satisfaction rates and erectile function in patients treated with sildenafil, intracavernous prostaglandin E1 and penile implant surgery for erectile dysfunction in urology practice. *J Urol*. 2003 Jul;170(1):159-63.
14. Montorsi F, Rigatti P, Carmignani G, et al. AMS three-piece inflatable implants for erectile dysfunction: a long-term multi-institutional study in 200 consecutive patients. *Eur Urol*. 2000 Jan;37(1):50-5.
15. Otero JR, Cruz CR, Gómez BG, et al. Comparison of the patient and partner satisfaction with 700CX and Titan penile prostheses. *Asian J Androl*. 2016 Jan 22.
16. Penile Implants - Erectile Dysfunction. Sex Health Matters Website: <http://www.sexhealthmatters.org/erectile-dysfunction/penile-implants-erectile-dysfunction/P7>. Accessed Dec. 3, 2014.
17. AMS 700™ Penile Prosthesis Product Line Instructions for Use. American Medical Systems. 2016.
18. Carson CC 3rd, Mulcahy JJ, Harsch MR. Long-term infection outcomes after original antibiotic impregnated inflatable penile prosthesis implants: up to 7.7 years of follow-up. *J Urol*. 2011 Feb;185(2):614-8.
19. Salem EA, Wilson SK, Neeb A, et al. Mechanical reliability of AMS 700 CX improved by parylene coating. *J Sex Med*. 2009 Sep;6(9):2615-20.
20. Sellers T, Dineen M, Salem E, et al. Vacuum preparation, optimization of cylinder length and postoperative daily inflation reduces complaints of shortened penile length following implantation of inflatable penile prosthesis. *Adv in Sex Med*. 2013;3:14-8.
21. Natali A, Olianias R, Fisch M. Penile implantation in Europe: successes and complications with 253 implants in Italy and Germany. *J Sex Med*. 2008 Jun;5(6):1503-12.
22. Enemchukwu EA, Kaufman MR, Whittam BM, et al. Comparative revision rates of inflatable penile prosthesis using woven Dacron™ fabric cylinders. *J Urol*. 2013 Dec;190(6):2189-93.



Boston Scientific Corporation
 300 Boston Scientific Way, Marlborough, MA 01752
www.amsmenshealth.com

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

©2017 Boston Scientific Corporation o sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

MH-403518S-AA NOV 2016